



*The freedom to move*

## Ensemble d'ailettes de mousse pour avant-bras

### Objectif:

Réduire le diamètre de la manchette d'appui de l'avant-bras. Ceci pourrait être nécessaire pour les gens qui dotent de plus petits avant-bras.

### Instructions:

1. Premièrement, essayez les béquilles smartCRUTCHMC pour en mesurer la taille. (Gardez bien à l'esprit que des vêtements épais pourraient être un facteur.)
2. Exécutez une prise d'essai avec la première pièce comme il est indiqué dans la Fig. 1; celle avec la couverture adhésive blanche qui est placée à l'intérieur de la manchette et là où la manchette de mousse s'aligne avec la mousse existante.
3. Dès que vous êtes satisfait, retirez la couverture adhésive blanche (Fig. 2) et collez-la en place.
4. Répétez ces étapes avec les 3 pièces restantes.

